




## ПРАВИЛА СДАЧИ АНАЛИЗА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИТРА АНТИТЕЛ К ВИРУСУ БЕШЕНСТВА

**ОТБОР МАТЕРИАЛА (КРОВЬ)  
ПРОИЗВОДИТСЯ В  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ  
ПРОБИРКУ БЕЗ НАПОЛНИТЕЛЯ  
(С БЕЛОЙ КРЫШКОЙ):**

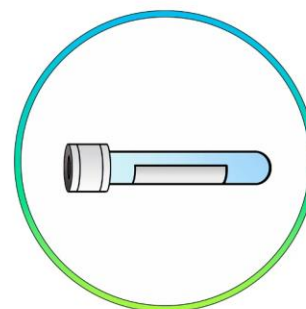

1. Анализ проводится не ранее, чем через 30 дней после последней вакцинации от бешенства и за 2 месяца до окончания срока действия вакцины.
2. Животное обязательно должно быть чипировано!
3. Возраст животного должен быть не менее 4х месяцев.
4. Обязательно наличие ветеринарного паспорта международного образца (ФИО владельца и кличка животного заполнены на английском языке).
5. Необходимо заполнить дополнительное направление

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ СЫВОРОТКИ:

1. Максимальный срок хранения сыворотки при температуре +4°C...+8°C не более 2х суток.
2. При необходимости хранения более 2х дней, отцентрифугированную отделенную сыворотку замораживают при температуре -20°C.
3. Сыворотка крови не должна подвергаться размораживанию.

### К исследованию НЕ ПРИНИМАЕТСЯ:

- цельная кровь или образцы с примесью форменных элементов крови;
- сыворотки крови с сильным гемолизом (темно-красного цвета);
- сыворотки крови с осадком, мутные, с гнилостным запахом.